

Faszination Prothetik

Cercon® Malfarben und Glasur

Cercon® Malfarben sind geeignet zur Charakterisierung und Farbgebung von Kronen und Brücken aus Zirkonoxid (Y-TZP) mit einem WAK von $10,5 \mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25 – 500 °C), die vorzugsweise aus Cercon® base (in allen Farbvarianten) und Cercon® ht hergestellt wurden.

Die Cercon® Malfarben können sowohl direkt auf das Zirkonoxidgerüst als auch auf verblendete Gerüste mit Cercon® ceram Kiss oder Cercon® ceram love angewendet werden.

| Cercon® Malfarben Set | | REF 53 6739 0113 |
|-------------------------------|-------|------------------|
| Cercon® Body-Malfarbe 1 | 4 g | REF 53 6736 1811 |
| Cercon® Body-Malfarbe 2 | 4 g | REF 53 6736 1821 |
| Cercon® Body-Malfarbe 3 | 4 g | REF 53 6736 1831 |
| Cercon® Body-Malfarbe 4 | 4 g | REF 53 6736 1841 |
| Cercon® Body-Malfarbe 5 | 4 g | REF 53 6736 1851 |
| Cercon® Body-Malfarbe 6 | 4 g | REF 53 6736 1861 |
| Cercon® Body-Malfarbe 7 | 4 g | REF 53 6736 1871 |
| Cercon® Body-Malfarbe 8 | 4 g | REF 53 6736 1881 |
| Cercon® Body-Malfarbe 9 | 4 g | REF 53 6736 1891 |
| Cercon® Malfarbe Weiss | 4 g | REF 53 6736 1511 |
| Cercon® Malfarbe Strato | 4 g | REF 53 6736 1521 |
| Cercon® Malfarbe Taiga | 4 g | REF 53 6736 1551 |
| Cercon® Malfarbe Grau | 4 g | REF 53 6736 1571 |
| Cercon® Malfarbe Ivory | 4 g | REF 53 6736 1621 |
| Cercon® Malfarbe Caramel | 4 g | REF 53 6736 1641 |
| Cercon® Malfarbe Amber | 4 g | REF 53 6736 1651 |
| Cercon® Malfarbe Terra | 4 g | REF 53 6736 1661 |
| Cercon® Malfarbe Schwarz | 4 g | REF 53 6736 1671 |
| Cercon® Glasur | 12 g | REF 53 6736 3503 |
| Ducera® Liquid Stain improved | 15 ml | REF 53 6827 4613 |



22220/1106/GVD
Stand: 06/2011



Allgemeine Brennempfehlungen

| Brand | Vorwärmen °C | Trocknen °C | Aufheizen °C/min. | Endtemperatur °C | Halten min. | Vakuum hPa | Kühlen min. |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Malfarbe/Glasur | 450 | 3:00 | 55 | 800 | 1:00 | - | 6:00 |

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen von Cercon® ceram Kiss bzw. Cercon® ceram love. Die aktuellen Gebrauchsanleitungen und Brenntabellen finden Sie unter www.degudent.de.