


Anwendungshinweise

Das Solaris® Goldbad ist zusammen mit dem Solaris® Aktivator in einem Wieland AGC Micro Plus Gerät einsetzbar.


Es ist zu beachten, dass das Mischungsverhältnis von 100 ml Goldbad zu 5 ml Aktivator eingehalten wird.

Die zum Abscheiden erforderliche Goldbadmenge ist der zugehörigen Tabelle des Wieland AGC Micro Plus Gerätes zu entnehmen.

Die Einstellungen aller übrigen Geräteparameter sind der original Arbeitsanleitung des Gerätes zu entnehmen.

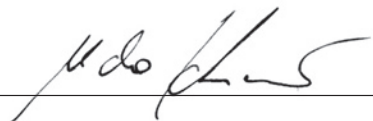

Dr. Udo Schusser
Leiter Forschung und Entwicklung

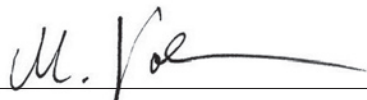

Dr. Markus Vollmann
Leiter Anwendungstechnik