

# Anwendungshinweise


Das Solaris® Goldbad supra ist in einem Trendgalvano-Gerät Genius-PERFEKT einsetzbar und für Mehrfachabscheidungen geeignet.

Ein Aktivator ist nicht notwendig.


Eingabe der Badparameter für 500 ml Solaris® Goldbad supra:

Goldgehalt im Bad:	7,50
Badmenge:	0,500
Badtyp:	NORMAL

Die Einstellungen aller übrigen Geräteparameter sind der originalen Arbeitsanleitung des Gerätes zu entnehmen.

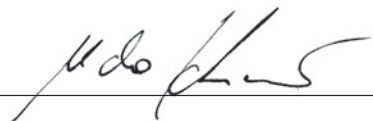

Dr. Udo Schusser  
Leiter Forschung und Entwicklung

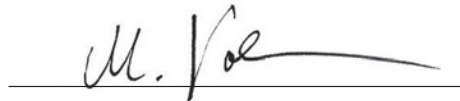

Dr. Markus Vollmann  
Leiter Anwendungstechnik