


# Anwendungshinweise

Das Solaris® Goldbad supra ist in einem Wieland AGC 5 Process Gerät einsetzbar.


Ein Aktivator ist nicht notwendig.

Die Einstellungen der Geräteparameter sind der original Arbeitsanleitung des Gerätes zu entnehmen. Folgende Abweichungen davon sind zu beachten:

- Der ausarbeitbare Goldgehalt des Solaris® Goldbad supra liegt bei 6,75 g/500 ml.
- Die Einstellung „Goldbad wechseln“ bzw. „ca. 0,00 g ausgearbeitet“ wird so lange gewählt, bis mehr als 1,75 g Gold abgeschieden wurden. Danach wird der weiter ausgearbeitete Goldanteil in der Differenz zu 5,0 g entsprechend eingegeben.
- Zur Erreichung ausreichender Wandstärken wählen Sie um 50 bis 100 µm höhere Schichtstärken.

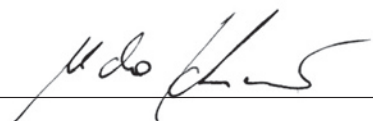

Dr. Udo Schusser  
Leiter Forschung und Entwicklung

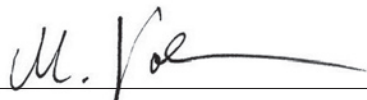

Dr. Markus Vollmann  
Leiter Anwendungstechnik