



Schärfer modellieren:

MagiCut Back

Die Präzisionswerkzeug-Linie
nach J. Braunwarth

Degussa Dental
a healthy world smiles

Produktnummern

Set mit Einzelinstrumenten	5999 0100
Einzelinstrument Snake	5999 0101
Einzelinstrument Little Heart	5999 0102
Einzelinstrument Dragon	5999 0103
Einzelinstrument Crocodile	5999 0104
Einzelinstrument Dolphin	5999 0105
Instrumentenhalter	5999 0106

www.degussa-dental.de




Schärfer modellieren:

MagiCut Back

Die Präzisionswerkzeug-Linie
nach J. Braunwarth

Eine klare Linie für Präzision und Augenmaß: das MagiCut Back-Modellier-Set von Degussa Dental.

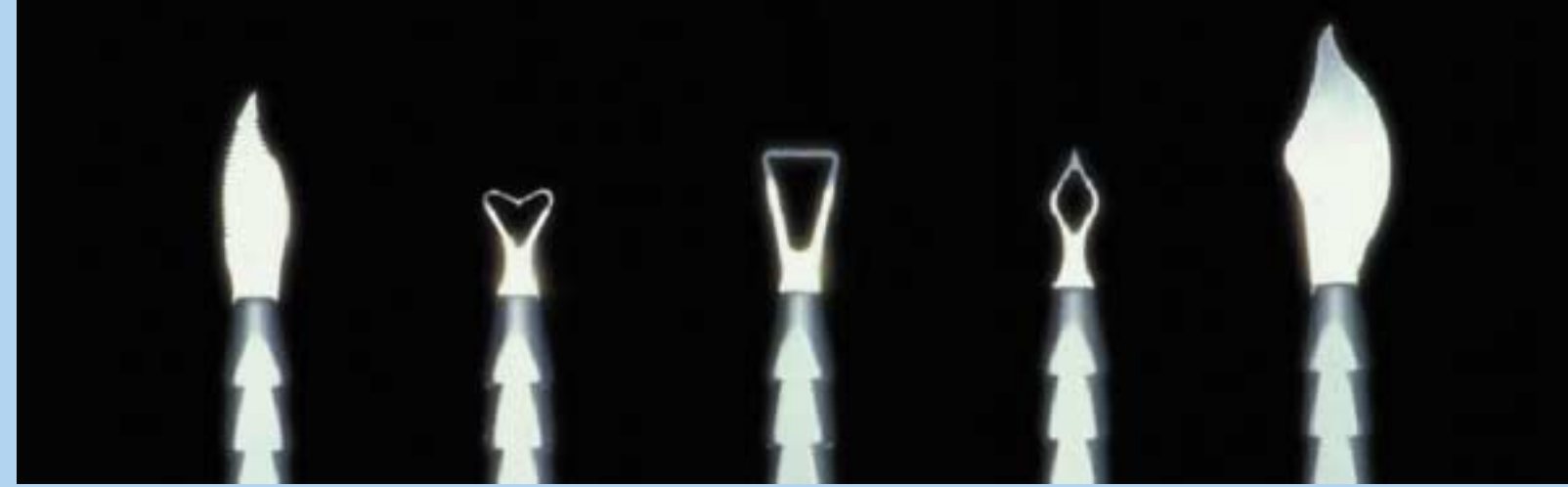

Mit der Präzisionswerkzeug-Linie MagiCut Back nach J. Braunwarth des Keramikspezialisten Degussa Dental verfügen Sie stets über das ideale Werkzeug für ein filigranes Bearbeiten der Modelliermassen vor dem Sinterbrand. Die prägnanten Formen der fünf Instrumente, von denen sich auch ihre Namen ableiten, erleichtern das feine manuelle Herausarbeiten von Zahnschichten und -formen während des Kermikaufbaus durch Schaben, Ritzen, Abtragen, Separieren und Trennen.

- **effizient**
- **rationell**
- **ökonomisch**
- **zielgenau**
- **kontrolliert**
- **systematisch**
- **exakt**

Snake

Das spitz zulaufende Schlingen-Formteil ermöglicht ein exaktes Eröffnen der Fissuren und erleichtert das Formen des Mamelon-Designs. Snake vereinfacht gezieltes Abtragen und Abschälen dünner Schichten an Zahnaußenflächen und Kauflächen.



Little Heart



Mit Hilfe des spitzen Anteils des Instrumentes werden Mamelons individuell gestaltet. Keile und Vertiefungen werden effizient herausgearbeitet. Mit dem Ausstellwinkel des formgebenden Elements wird die Einschnitttiefe festgelegt.

Dragon



Dragon erleichtert eine kontrollierte Reduzierung der einzelnen Keramikmassen während der Schichtung an den Labial- und Palatinalflächen der Frontzähne. Durch die Schlingenform können sehr dünne Keramikschichten abgetragen werden.

Crocodile

Dieses Instrument ist vorwiegend zum Separieren und Durchtrennen der Keramikmasse bestimmt. Das fein gezackte Außenprofil eignet sich sehr gut für bereits stärker ausgetrocknete Keramikmassen. Durch die extrem feine Klingienstärke von Crocodile ist eine entsprechend dünne Durchtrennung sichergestellt.



Dolphin



Mit Hilfe dieser extrem dünnen und flexiblen Klingenform ist ein figürliches Separieren und Durchtrennen sehr einfach. Die durchdachte Form der Dolphin-Klinge bietet optimale Sicht auf den Approximalraum während des Separierens.