

# Gebrauchsanleitung

## Connectorpaste DUCERA-LAY

Die DUCERA-LAY Connectorpaste ist eine gebrauchsfertige Keramikpaste. Sie versiegelt – nach dem Brand – die Oberfläche der DUCERA-LAY Stumpfmasse und stellt somit einen sicheren Verbund zwischen der Stumpfmasse und der Keramik her.

Die Connectorpaste ist hydrophob (wasserabweisend) und darf nicht mit Wasser in Berührung gebracht werden (Schlierenbildung).

Der Vorteil dieser Connectorpaste liegt in der leichten und gleichmäßigen Applikationsmöglichkeit. Darüber hinaus wird eine enorme Zeitersparnis erzielt, da die DUCERA-LAY Stümpfe nicht mehr mit Sättigungsflüssigkeit getränkt werden müssen.

### Anleitung:

Die Stümpfe aus DUCERA-LAY Stumpfmasse werden in üblicher Weise hergestellt.

**Wichtig:** Die Stümpfe dürfen nicht mit Sättigungsflüssigkeit behandelt werden!

Nach dem Sinterungsbrand wird die Connectorpaste mit dem beiliegenden kurzhaarigen Borstenpinsel dünn deckend auf die trockene Präparationsfläche des abgekühlten DUCERA-LAY Stumpfes aufgetragen. Lassen Sie die Connectorpaste ca 1–2 mm über die Präparationsgrenze hinaus auslaufen.

**Zum Reinigen der Pinsel ist der DUCERAM-Pinselreiniger zu verwenden.**

### Brennanleitung:

Vortrocknen:	1 Min.
Vorwärmen:	3 Min.
Vorwärmtemperatur:	620 °C
Heizrate:	55 °C mit Vakuum
Endtemperatur:	970 °C
Haltezeit:	1 Min.