

Brennprogramme StarLight Ceram®

Austromat® 3001 Keramikbrennofen

StarLoy C	
Pastenopaker 1	C575 T360 T60•L9 V9 T055•C980 V0 T180 C0 L0 T2 C575
Pastenopaker 2	C575 T360 T60•L9 V9 T055•C950 V0 T120 C0 L0 T2 C575
Schultermasse	C575 T180 T180•L9 T120 V9 T055•C920 V0 T60 C0 L0 T2 C575
Dentinbrand 1	C575 T180 T180•L9 T120 V9 T055•C910 V0 T60 C0 L7 C850 L9 T180 C0 L0 T2 C575
Dentinbrand 2	C575 T180 T180•L9 T120 V9 T055•C900 V0 T60 C0 L7 C850 L9 T180 C0 L0 T2 C575
Glanzbrand	C575 T180 T180•L9 T055•C890 T60 C0 L7 C850 L9 T180 C0 L0 T2 C575

StarLoy soft	
Pastenopaker 1	C575 T360 T60•L9 V9 T055•C980 V0 T180 C0 L0 T2 C575
Pastenopaker 2	C575 T360 T60•L9 V9 T055•C950 V0 T120 C0 L0 T2 C575
Schultermasse	C575 T180 T180•L9 T120 V9 T055•C920 V0 T60 C0 L0 T2 C575
Dentinbrand 1	C575 T180 T180•L9 T120 V9 T055•C920 V0 T60 C0 L7 C850 L9 T180 C0 L7* C575 C0 L0 T2 C575
Dentinbrand 2	C575 T180 T180•L9 T120 V9 T055•C910 V0 T60 C0 L7 C850 L9 T180 C0 L7* C575 C0 L0 T2 C575
Glanzbrand	C575 T180 T180•L9 T055•C900 T60 C0 L7 C850 L9 T180 C0 L7* C575 C0 L0 T2 C575

***) Bei größeren Restaurationen kann zur zeitlichen Verlängerung des Entspannungskühlens anstelle von Position L7 auch L8 oder L9 einprogrammiert werden.**

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller- und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepasst werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden, werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben.

Hersteller:

DeguDent GmbH

Postfach 1364 · 63403 Hanau
www.dentsply-degudent.de

