

## Brennprogramme StarLight Ceram®

### Multimat® Touch & Press Keramikbrennöfen

StarLoy C	Vorwärmtemperatur °C	Trocknen Min.	Vorwärmen Min.	Vakuum hPa	Aufheizrate °C/min.	Brenntemperatur °C	Vakuumzeit Min.	Brennzeit Min.	Tempern
PO 1	575	7:00	1:00	50	55	980	1:00	2:00	
PO 2	575	7:00	1:00	50	55	950	1:00	2:00	
Schulter 1+2	575	5:00	2:00	50	55	920	1:00	2:00	
Dentin 1 *	575	5:00	2:00	50	55	920	1:00	2:00	3min/850°C
Dentin 2 *	575	5:00	2:00	50	55	910	1:00	2:00	3min/850°C
Glanzbrand *	575	3:00	1:00	---	55	900	0:00	1:00 -2:00	3min/850°C

\*) alternativ: Langzeitkühlung

StarLoy soft	Vorwärmtemperatur °C	Trocknen Min.	Vorwärmen Min.	Vakuum hPa	Aufheizrate °C/min.	Brenntemperatur °C	Vakuumzeit Min.	Brennzeit Min.	Tempern	Kühlen
PO 1	575	7:00	1:00	50	55	980	1:00	2:00		
PO 2	575	7:00	1:00	50	55	950	1:00	2:00		
Schulter 1+2	575	5:00	2:00	50	55	920	1:00	2:00		
Dentin 1	575	5:00	2:00	50	55	920	1:00	2:00	3min/850°C	Stufe 2 / .3
Dentin 2	575	5:00	2:00	50	55	910	1:00	2:00	3min/850°C	Stufe 2 / 3
Glanzbrand	575	3:00	1:00	---	55	900	0:00	1:00 -2:00	3min/850°C	Stufe 2 / 3

**Die Wahl der Kühlstufe ist abhängig von der Größe der Restauration.**

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller- und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepasst werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden, werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben.

Hersteller:

**DeguDent GmbH**

Postfach 1364 · 63403 Hanau  
www.dentsply-degudent.de

## Multimat® C Keramikbrennöfen

StarLoy C	Vorwärmtemperatur °C	Trocknen Min.	Vorwärmen Min.	Vakuum hPa	Aufheizrate °C/min.	Brenntemperatur °C	Vakuumzeit Min.	Brennzeit Min.	Kühlen
PO 1	575	7:00	1:00	50	55	980	1:00	2:00	
PO 2	575	7:00	1:00	50	55	950	1:00	2:00	
Schulter 1+2	575	5:00	2:00	50	55	920	1:00	2:00	
Dentin 1 *	575	5:00	2:00	50	55	920	1:00	2:00	Stufe 2 / .3
Dentin 2 *	575	5:00	2:00	50	55	910	1:00	2:00	Stufe 2 / 3
Glanzbrand *	575	3:00	1:00	---	55	900	0:00	1:00 -2:00	Stufe 2 / 3

Die Wahl der Kühlstufe ist abhängig von der Größe der Restauration.

StarLoy soft	Vorwärmtemperatur °C	Trocknen Min.	Vorwärmen Min.	Vakuum hPa	Aufheizrate °C/min.	Brenntemperatur °C	Vakuumzeit Min.	Brennzeit Min.	Kühlen
PO 1	575	7:00	1:00	50	55	980	1:00	2:00	
PO 2	575	7:00	1:00	50	55	950	1:00	2:00	
Schulter 1+2	575	5:00	2:00	50	55	920	1:00	2:00	
Dentin 1	500	6:00	2:00	50	55	920	1:00	2:00	Stufe 2 / .3
Dentin 2	500	5:00	2:00	50	55	910	1:00	2:00	Stufe 2 / 3
Glanzbrand	500	3:00	1:00	---	55	900	0:00	1:00 -2:00	Stufe 2 / 3

Die Wahl der Kühlstufe ist abhängig von der Größe der Restauration.

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller- und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepasst werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden, werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben.

Hersteller:

**DeguDent GmbH**

Postfach 1364 · 63403 Hanau  
www.dentsply-degudent.de